

CMP 2

KANYLEBYTTEBOKS


BRUGSANVISNING



Indholdsfortegnelse

Sikkerhed	2
Oversigt - Eksternt	3
Oversigt - Internt	4
Montering	5
Idriftsættelse	5
Drift	5
Brug af kanylebytteboksen	5
Påfyldning af beholderen med nye kanylesæt	5
Registrering af SALTO lås	6
Programmering af SALTO kort	6
Læsning af data fra SALTO lås	6
Læsning af data fra SALTO kort	6
Udskiftning af spand til brugte kanylesæt	6
Udskiftning af batterierne	6
Montering af nytårssikring	6
Teknisk Data	7
Bortskaffelse af kanylebytteboksen	7

Sikkerhed

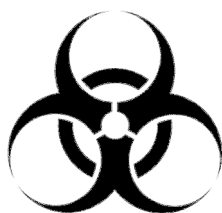


ADVARSEL: biohazard.

Kanylebytteboksen kan indeholde brugte kanyler. Af sikkerhedsmæssige årsager kræver det derfor uddannelse og autorisation at åbne og servicere kanylebytteboksen.


- Spanden til brugte kanylesæt skal skiftes jævnligt, så den ikke bliver overfyldt.
- Kanylebytteboksen skal fastmonteres på underlaget.

Oversigt – Udvendig

- (1) Topdæksel
- (2) Kortlæser
- (3) Lås A til topdæksel
- (4) Uddelingsknap
- (5) Uddelingsskuffe
- (6) Fordør
- (7) Lås B til fordør

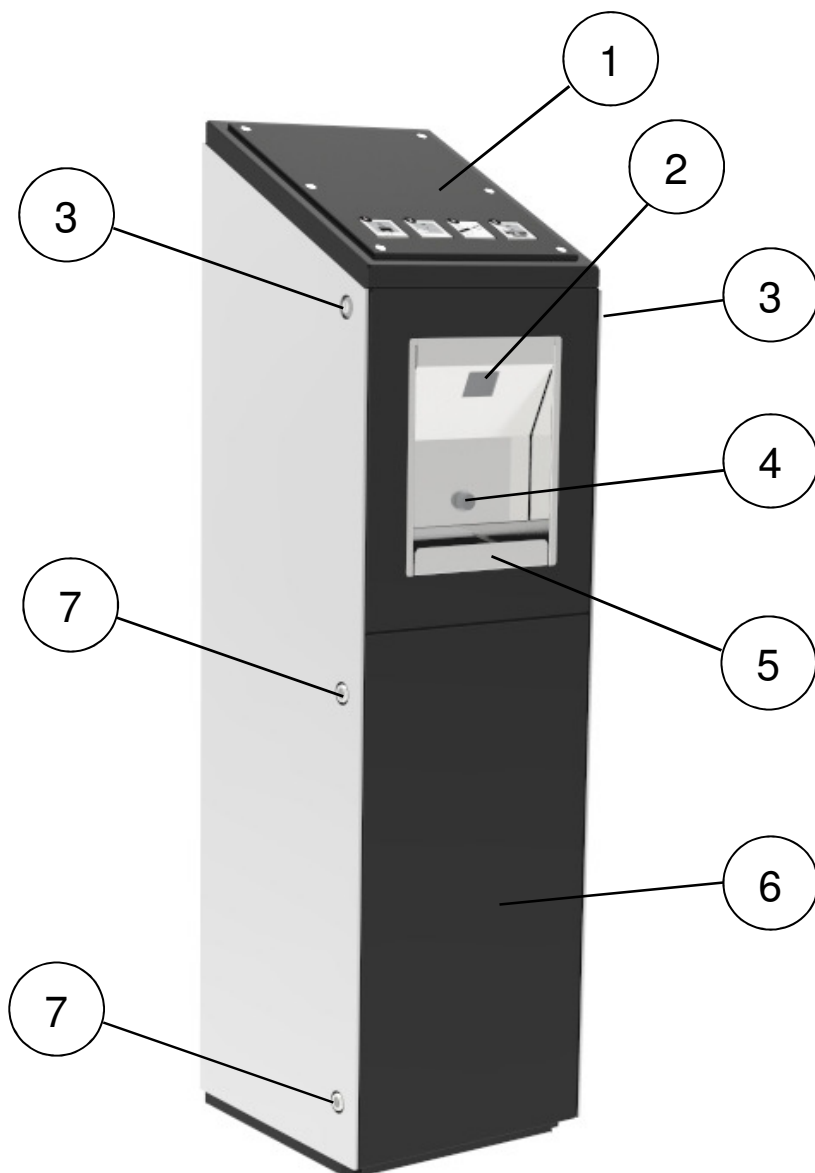


- (8) PPD stik
- (9) Afleveringsrum for brugte kanylesæt

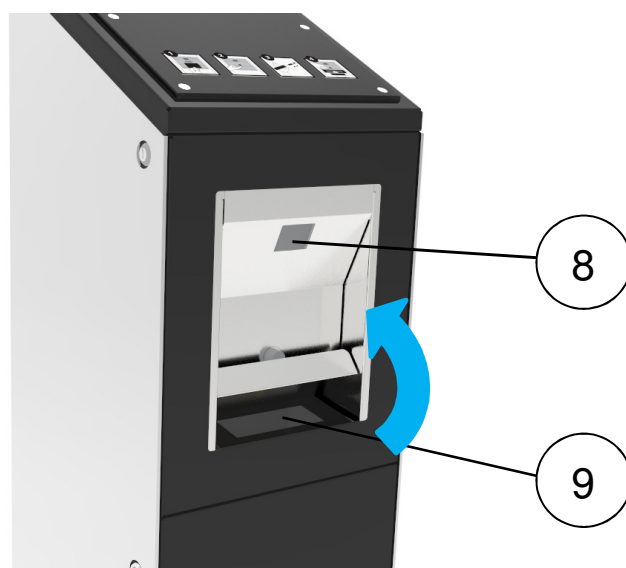


Øversigt – Indvendig

(10) Beholder til nye kanylesæt

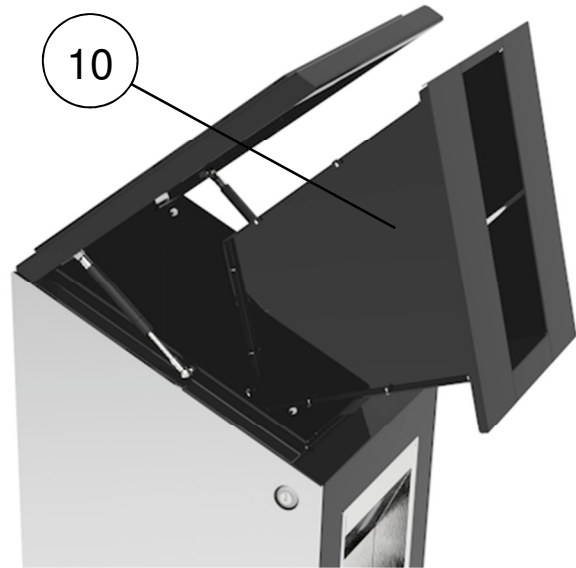

(11) Kasse med styreelektronik

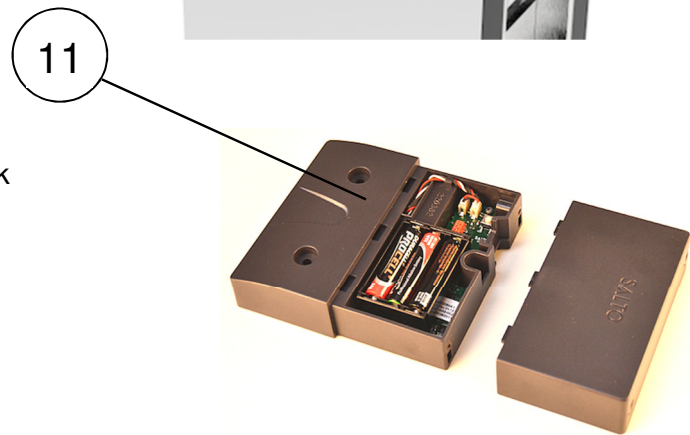

(12) Spand til brugte kanylesæt



Montering

1. Montér kanylebytteboksen på en hård, plan flade af fx beton eller asfalt.
2. Lås kanylebytteboksens fordør op med nøglesæt B og fjern spanden til brugte kanyler.
3. I fladen installeres fire Ø 12 bolte svarende til hullernes placering i bunden af kanylebytteboksen.
4. Placér kanylebytteboksen over boltene og fastgør boksen ved at placere en skive og en møtrik på hver bolt. Spænd møtrikkerne.
5. Sæt spanden til brugte kanyler tilbage i den nederste del af kanylebytteboksen. Luk fordøren og lås begge låse med nøglesæt B.

Alternativt: kanylebytteboksen kan stå på en blød overflade, men kun hvis den er monteret sikkert på en sokkel, der er nedgravet i jorden.

Idriftsættelse

1. Sæt nye batterier i elektronikkassen (se "Udskiftning af batterier" nedenfor).
2. Registrer SALTO lås (se "Registrering af SALTO lås" nedenfor).
3. Programmér SALTO kort (se "Programmering af SALTO kort" nedenfor).
4. Fyld beholderen til nye kanylesæt med kanylesæt (se "Påfyldning af beholderen til nye kanylesæt" nedenfor).
5. Fjern nytårssikringen (se "Nytårssikring" nedenfor).
6. Uddel SALTO kortene til brugerne.

Drift

Brug af kanylebytteboksen

Følg billederne på topdækslet:

1. Hold SALTO kortet over kortlæseren. Når kortlæseren registrerer et gyldigt kort, tænder et grønt LED lys, og kanylebytteboksen er klar til at uddele et nyt kanylesæt. Hvis kortet ikke er gyldigt, lyser et rødt LED lys.
2. Tryk på uddelingsknappen og et nyt kanylesæt falder ned i uddelingskuffen.
3. Tag det nye kanylesæt.
4. Åbn dækslet til bortskaffelse af brugte kanylesæt og læg det brugte kanylesæt i afleveringsrummet.

Påfyldning af beholderen med nye kanylesæt

1. Lås kanylebytteboksens topdækslet op ved hjælp af nøglesæt A.
2. Åbn topdækslet og fyld beholderen med kanylesæt. Beholderen må ikke overfyldes.
3. Luk og lås topdækslet på kanylebytteboksen ved hjælp af nøglesæt A.

Bemærk: Det anbefales at læse kanylebytteboksens logfil ved hjælp af en PPD (Portable Programming Device), når beholderen med nye kanylesæt fyldes op. Se "Læsning af data fra SALTO lås" nedenfor.

Registrering af SALTO lås

Inden kanylebytteboksen sættes i drift, skal dens SALTO lås registreres i databasen. Se "Softwaremanual" for oplysninger om, hvordan du registrerer SALTO låsen.

Programmering af SALTO kort

SALTO kortene sikrer uddeling af kanylesæt til autoriserede brugere. Hvert kort har en logfil som opdateres, når brugeren trækker et kanylesæt fra kanylebytteboksen. En udløbsdato kan anvendes, så brugerne regelmæssigt skal besøge et lokalt center for at forny deres adgang til kanylebytteboksen. Se "Softwaremanual" for oplysninger om programmering af SALTO kort.

Læsning af data fra SALTO lås

Kanylebytteboksens logfil kan læses ved hjælp af en PPD. Se "Softwaremanual" for flere oplysninger.

Læsning af data fra SALTO kort

SALTO kortets logfil kan læses på det lokale center. Se "Softwaremanual" for flere oplysninger.

Udskiftning af spand til brugte kanylesæt

ADVARSEL: Kun kvalificeret og autoriseret personale må håndtere spanden med brugte kanylesæt.

1. Lås fordøren op ved hjælp af nøglesæt B.
2. Åbn fordøren og fjern spanden med brugte kanylesæt.
3. Placér en ny, tom spand i kanylebytteboksen.
4. Luk fordøren og lås begge låse ved hjælp af nøglesæt B.

Udskiftning af batterierne

Udskiftning af batterierne hver 6. måned anbefales.

1. Lås topdækslet på kanylebytteboksen op ved hjælp af nøglesæt A.
2. Åbn topdækslet og fjern kanylesæt fra beholderen til kanylesæt.
3. Løft beholderen op ved at trække håndtaget opad. Når du har fjernet beholderen til kanylesæt, kan du se kassen med styreelektronik.
4. Skru håndskruerne på siden af kassen ud og fjern dækslet på kassen.
5. Tag de gamle batterier i kassen ud og læg nye batterier i.
6. Sæt dækslet på kassen igen og fastgør det med håndskruerne.
7. Sæt beholderen ind i kanylebytteboksen igen og fyld beholderen med kanylesæt.
8. Luk og lås topdækslet på kanylebytteboksen ved hjælp af nøglesæt A.

Montering af hærværkssikring ("Nytårssikring")


En sikringsplade mod hærværk følger med. For montering:

1. Lås kanylebytteboksens topdæksel op ved hjælp af nøglesæt A og åbn topdækslet.
2. Sæt nytårssikringspladen på plads.
3. Luk og lås topdækslet på kanylebytteboksen ved hjælp af nøglesæt A.

Tekniske Data

D:B:H	440 mm x 418 mm x 1526 mm
Tæthedegrad	IP 53
Driftstemperatur	-20°C til +40°C
Kanylesæt uddelingslås	Salto XS4-Locker 9000
Batterier	3 x 1,5 V AAA Lithium FR03
Spand til kanylesæt	WIVA FASS-4 60L (Elsborg Emballage)

Bortskaffelse af kanylebytteboksen

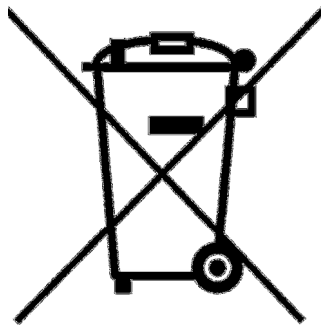

Ikke dagrenovation.

Vigtigt: Spanden til brugte kanylesæt skal fjernes af autoriseret personale før bortskaffelse af kanylebytteboksen.

Fjern batterierne. Genbrug som batterier.

Fjern elektronikkassen. Genbrug som elektronisk affald.

Resten af kanylebytteboksen er metal og lidt plast.



Copyright

© Copyright Conpleks Innovation ApS Denmark, June 2012.
All rights reserved. www.conpleks.com
EU-registered industrial design

Disclaimer

All content and specifications are subject to change without notice.

Trademark List

Conpleks® is a registered trademark of Conpleks Innovation ApS
All trademarks are properties of their respective owners.